

## **BRIS KOŽE**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – bris se uzima pamučnim štapićem, prethodno navlaženim u sterilnoj fiziološkoj otopini, rotirajućim pokretom po promijenjenom području.

**TRANSPORT** – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.

### **Dodatne upute za uzimanje uzoraka noktiju, kože i dlaka za mikološku obradu**

Bolesnik ne smije 5 dana prije uzimanja uzoraka za mikološku dijagnostiku tretirati oboljelo područje pripravcima koji sadrže antimikotike (lijekove za liječenje gljivičnih infekcija). Na dan uzimanja uzorka koža se ne smije tretirati kozmetičkim preparatima i šminkom, a nokti ne smiju biti lakirani.