

## **BRIS NAZOFARINKSA**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – tanki pamučni bris uvodi se horizontalno, prateći nosni hodnik, do stražnje stijenke nazofarinksa te se izvlači nakon 5 sekundi.

**TRANSPORT** - bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.