

BRIS UHA

UPUTA ZA UZIMANJE – bris se uzima pamučnim štapićem, prethodno navlaženim u sterilnoj fiziološkoj otopini. Rotirajućim pokretima briše se vanjski kanal zvukovoda.

TRANSPORT – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

KOLIČINA UZORKA - bris sa ili bez transportnog medija.