

## UZORAK STOLICE ZA VIROLOŠKU PRETRAGU

- Uzorak stolice uzeti u prva tri dana od početka simptoma (najbolje 2 uzorka stolice unutar 24 sata).
- Potrebna su 2 – 3 mL uzorka tekuće stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka) u sterilnoj posudici.
- Uzorak stolice treba odmah dostaviti u prijemnu ambulantu, a ako to nije moguće, uzorak se može pohraniti na +4 °C najduže 48 sati. Dostavlja se u putnom hladnjaku ili termos boci.
- Ako nije moguće uzorke stolice dostaviti tijekom 48 sati, treba se posavjetovati s liječnikom mikrobiologom.
- Uzorak stolice može biti pohranjen duže vrijeme na temperaturi od –18 °C i niže.
- Zamrznuti uzorak stolice treba dostaviti u prijemnu ambulantu na ledu u termos boci.
- Rezultati virološke pretrage uzorka stolice su dostupni za 2 – 14 dana.